

## Pelvix Concept



Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

**Pris**

Kr 495,00

Utsalgspris ekskl. mva Kr 396,00

Mva-beløp Kr 99,00

**24 h**

\*\*\*\*\*

[Kontakt oss angående dette produktet](#)

### Beskrivelse

**Pelvix Concept bedrer sexlivet ditt og gir deg mer nytelse.**

Pelvix Concept er designet for opptrening og stimulering av dine bekkenmuskler. Den har en perfekte symbiose mellom kinesiske baller og vaginal kjegler.

Historien om kinesiske baller, som opprinnelige heter 'Ben Wa' og som betyr glede, går tilbake til Japan.

De ble skapt for keiserens konkubiner, slik at de alltid var klar til disposisjon med sin bekkenbunn riktig trent og med ett ideelt vaginaltrykk. Dette betydde intense seksuelle relasjoner, noe som ga dem mye seksuell nytelse.

Pelvix Concept vil gi deg en perfekt muskeltonus. Fundamentalt for å nyte ett sunt, fullt og tilfredsstillende sexliv.

Pelvix Concept er resultatet av ett nært samarbeid mellom gynekologer og urologer fra flere forskjellige land.

De gjennomførte en grundig analyse av fordeler og ulemper med de ulike naturlige metodene som finnes i markedet for å styrke og bygge opp bekkenbunnen,

vaginal kjegler eller geisha baller. Dette er en ny alternativ metode som perfekt oppfyller de terapeutiske kravene i perineum oppbygning.

**Hvordan bruker du Pelvix Concept?**

Behandling med Pelvix Concept innebærer øvelser for å bedre muskelstyrke, elastisitet og hindre urinlekkasje.

Det øker muskelmassen i bekken musklene. Ved å bruke Pelvix Concept i 15-20 minutter om dagen i 1 til 4 måneder, forutsatt at du holder deg strengt til rutinen, vil du kunne oppnå merkbare forbedringer.

### Prosedyre, behandling:

- Begynn behandling ved å sette inn Pelvix Concept uten vekter, inn i skjeden din som om det var en tampong. Prøv å holde den inne i 15 minutter. Du må bli stående eller bevege deg rundt i denne perioden. Aldri sitt eller ligg. Pelvix vil stige og falle under sin egen vekt, som vil føre til en spontan refleks som trekker sammen bekkenbunnsmusklene. Denne handlingen gir svært effektiv og spesifikk fysioterapi.
- Hold denne rutinen i så mange dager som mulig, til du kan holde vekten helt komfortabelt.
- Sett den letteste ballen i Pelvix Concept ved å skru av korken.
- Gjenta rutinen og øk vekten gradvis til du kan bære den siste vekten godt.
- Hvor lang tid du trenger for å utføre alle trinnene avhenger av din muskelmasse og tilstand. Du kan eventuelt besøke din gynekolog for å holde en sjekk på hvordan det går.
- Cirka behandlingstiden er 1-4 måneder.
- Ikke overskrid den daglige behandlingstiden, da dette kan føre til muskeltretthet.

### Spesifikasjoner

Lengde: 6,3 cm

Ø: Max 3,5 cm

Vekt baller: 9, 17, 34 gram

Laget av medisinsk silikon i høy kvalitet

### Omtaler

Det er ennå ingen omtaler for dette produktet.